

## Scholl Professional hat eine geniale Lösung gegen Warzen:

Der Scholl Professional Freeze+ Warzen-Entferner *Hygienic* für eine zuverlässige und sichere Behandlung daheim.



Mit  
Hygiene Feile  
& Pflaster



# FREEZE+

## Warzen-Entferner *Hygienic*

Die Vorteile auf einen Blick:

- ⌚ Entfernt Warzen schnell, sicher und effektiv – meist genügt nur eine Anwendung
- ⌚ Medizinisch bewährte Technologie für zuhause
- ⌚ Besonders hygienisch
- ⌚ Für Kinder ab 4 Jahren geeignet
- ⌚ Von Hausärzten angewandte Methode
- ⌚ Klinisch bestätigt




ITEM: 1003846

SSL Healthcare Deutschland GmbH & Co. KG, 63477 Maintal  
SSL Healthcare Österreich GmbH, 1140 Wien  
[www.scholl-professional.com](http://www.scholl-professional.com)

## Warzen? Das muss nicht sein!

Mit Scholl Professional können Sie Warzen schnell und effektiv behandeln.

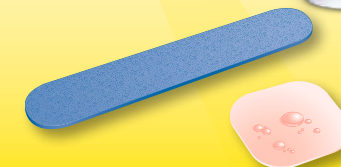

Fußgesundheit aus professionellen Händen

## Warzen sind ein ernstes Problem

Sie sehen nicht nur hässlich aus, sie können auch starke Schmerzen verursachen, sich leicht entzünden und äußerst ansteckend sein. Warzen sind als Hautproblem nicht zu unterschätzen.

Der Scholl Professional FREEZE+ Warzen-Entferner *Hygienic* ermöglicht eine **schnelle, sichere und effektive Behandlung für zuhause** – entfernt Warzen meist nach **der 1. Anwendung**.

Der Scholl Professional FREEZE+ Warzen-Entferner *Hygienic* beruht auf dem Prinzip der **Vereisung** mit flüssigem Stickstoff, das in Krankenhäusern und Kliniken angewendet wird.

Die Anwendung ist einfach und die Warze wird schnell und effektiv vereist. Durch das Vereisen bildet sich eine Blase unter der Warze. Die Warze wird sich nach 10 bis 14 Tagen von der Haut ablösen und an ihrer Stelle bildet sich neue Haut.



Gesunde Haut kann nachwachsen.  
Das Warzenproblem ist beseitigt.

## Eiskalt gegen Warzen

Besonders praktisch: Mit dem **verlängerten Applikator** lassen sich alle Fußstellen problemlos erreichen und gezielt behandeln. Der **Einweg-Schwammaufsatz** auf dem Applikator verhindert eine erneute Ansteckung.

Besonders hygienisch: Einweg-Feilen, Applikatoren und Pflaster helfen dabei, die Neuansteckungsgefahr zu reduzieren!

Einfache Anwendung – in 8 Schritten:

-  1. Baden Sie den betroffenen Körperteil **5 Minuten** lang in warmem Wasser. Vor dem Abfeilen die Haut gründlich abtrocknen.
-  2. Feilen Sie die Warze vorsichtig ab, um die harte Oberflächenhaut zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel abfeilen.
-  3. Befestigen Sie einen Einweg-Applikator an der weißen Applikations-Hilfe, indem Sie diesen in die größere Öffnung am Ende stecken (siehe Abbildung).
-  4. Stellen Sie die Dose aufrecht auf einen Tisch oder einen anderen festen Untergrund. Legen Sie gegebenenfalls eine Unterlage unter die Dose, um eventuell austretende Flüssigkeit aufzufangen. **Halten Sie die Dose von Ihrem Gesicht oder anderen Körperteilen fern und vermeiden Sie den Kontakt mit Ihren Kleidungsstücken.** Setzen Sie die Kappe der Abbildung entsprechend so auf die Dose, dass die Applikatorspitze in der durchsichtigen Schutzvorrichtung seitlich an der Dose sitzt.
-  5. Halten Sie die Dose weiterhin wie abgebildet aufrecht und drücken Sie die Kappe **5 SEKUNDEN** lang fest nach unten. **Nicht die durchsichtige Schutzvorrichtung an der Dose berühren.**
-  6. Entfernen Sie die Applikations-Hilfe zusammen mit dem noch aufgesteckten Applikator von der Dose. Halten Sie die Applikations-Hilfe senkrecht nach unten und **WARTEN SIE 15 SEKUNDEN**. So kann sich die Flüssigkeit unten in der Applikatorspitze sammeln und die für eine effektive Behandlung erforderliche Vereisungstemperatur erreichen. **Lassen Sie nichts von der Flüssigkeit an Ihre Haut kommen und bringen Sie die Dose nicht in die Nähe Ihrer Augen.**
-  7. Die zu behandelnde Warze muss **nach oben gerichtet sein**. Halten Sie den Applikator weiterhin senkrecht und setzen Sie dann die Spitze vorsichtig in die Mitte der zu vereisenden Warze. **MINDESTENS 30 SEKUNDEN lang**, aber **NICHT LÄNGER ALS 40 SEKUNDEN** anwenden. Nicht tupfen. Nach dem Gebrauch den Applikator entsorgen.
-  8. Kleben Sie bei Bedarf ein Komfort-Pflaster auf die sensibilisierte Hautstelle.

Vor Anwendung bitte Beipackzettel sorgfältig lesen!

## Wissenswertes über Warzen

### Wie entstehen Warzen?

Warzen sind nicht nur unansehnlich, sondern auch äußerst lästig. Doch fast alle Menschen bekommen irgendwann in ihrem Leben eine Warze und schnell können sie zu einem ständigen Begleiter werden. Dabei hat die Bildung der unangenehmen Hautwucherung nichts mit mangelnder Hygiene zu tun, vielmehr werden Warzen durch ein ansteckendes Virus übertragen. Besonders leicht überträgt sich das Virus bei vorhandenen Wunden, Pilzinfektionen oder Durchblutungsstörungen.

### Kinder sind besonders gefährdet!

Da bei ihnen die Abwehrkräfte noch nicht voll entwickelt sind, kann sich das Virus leicht im Kindergarten, beim Sport – z. B. durch Kontakt mit Turn- und Badematten – oder auch im Schwimmbad oder in der Sauna übertragen. **Werden die Warzen nicht behandelt, so können sie zu einer Ansteckungsgefahr auch innerhalb der Familie führen.**

### Was sind die häufigsten Warzenarten?

Gewöhnliche Warzen (*verruca vulgaris*):



- Mit 13 % häufigste Warzenform
- „Blumenkohlähnliches“ Aussehen, hautfarben, hart und rau; werden auch als vulgäre Warzen bezeichnet
- Treten als vorwölbende Knötchen vor allem auf Fingern, Handrücken und Knien auf

Sohlen- oder Dornwarzen (*verruca plantaris*):



- Flach, mit hartem Außenrand, kleine schwarze Punkte in der Mitte
- Treten meist auf den Fußballen, den Zehenunterseiten oder an den Fersen auf und werden auch als Plantarwarzen bezeichnet
- Verursachen oft stechende Schmerzen beim Gehen und Stehen, leicht entzündlich